


Aide mémoire de la notice d'utilisation du SYSTÈME EOLE™.

©SYST'AM 2022

Se reporter aux préconisations d'emploi de la notice avant toute manipulation.

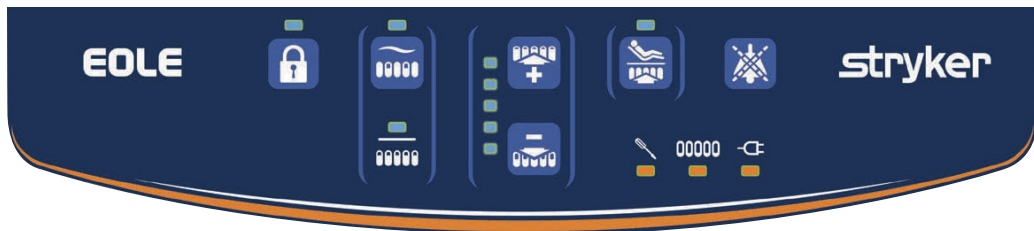

Vérouiller / Déverrouiller le clavier : appuyer 3 secondes. Verrouillage automatique après 3 minutes.

Sélection du mode : en fonction des préconisations du médecin prescripteur



Mode dynamique alterné.
Cycle de 12 minutes (2 x 6 minutes).



Mode statique basse pression continue.

Niveau de confort de couchage :



Plus ferme



Plus souple



Mode Soins (Nursing, Toilette, Transfert du patient...)



Désactivation de l'alarme sonore : appuyer pour désactiver le son de l'alarme. Si le problème persiste, l'alarme se déclenche de nouveau après un délai de 3 minutes.

ALARMES



Alarme de panne de courant

Vérifier si il n'y a pas de coupure d'électricité
Vérifier que la prise d'alimentation électrique n'est pas
déconnectée ou que le cordon électrique n'est pas
déconnecté de l'unité de contrôle.



Alarme perte de pression.

(Activée pendant le temps de gonflage du matelas)
Se déclenche lors d'une perte d'air. Dans ce cas
vérifier si la cellule à air n'est pas percée, ou s'il existe
une mauvaise connection des tuyaux d'alimentation en
air au matelas et au boîtier de contrôle. Vérifier si les
tuyaux d'alimentation en air ne sont pas pincés ou si
les valves CPR ne sont pas déconnectées.



Alarme de maintenance.


S'active en cas de panne mécanique. Contacter le
technicien en vue d'une réparation.



MODE TRANSPORT

En cas de panne de courant, de transfert
du patient sur son lit, ou de transport du
matelas gonflé : débrancher les
connecteurs air de l'unité de contrôle et
brancher ensemble les parties mâle et
femelle.

Le matelas en circuit fermé reste gonflé
plusieurs heures (6 heures minimum).

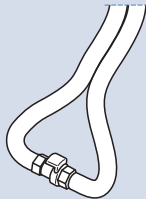

NETTOYAGE DE LA HOUSSE



Lavage en machine possible jusqu'à 95°C. Concentration
maximale de chlore autorisée < 1000 ppm (dans ce cas,
rinçage à l'eau claire impératif). Séchage en tambour à
température modérée. **Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à
sec. Ne pas utiliser de produit corrosif, ni de matériel
abrasif.**

*A domicile, en cas de souillures (liquide, urine,
selles), rapprochez-vous de votre prestataire.*

